



Bedankt dat u hebt gekozen voor de GH700 van Geheugenhulp

24 uren klok met 7 alarmmeldingen.

Type batterij

Knoopcel – LR44 – 1.5 volt batterij. Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden. (het alarm is voorzien van een nieuwe batterij)



Benamingen

MODE: van klok naar alarm gaan, ingedrukt: klok en alarm instellen;

HR: uur instellen;


MIN: minuten instellen;

AL: alarm aan/uit schakelen;

Instellingen

Let op!

Het alarm is vanuit Geheugenhulp ingesteld op de actuele tijd en zal op geluid staan.

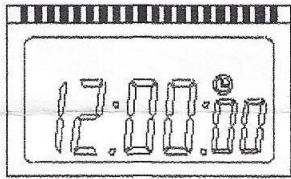

1. De juiste tijd instellen (deze is standaard al ingesteld door Geheugenhulp, dus deze stap kunt u overslaan))

Houd **MODE** toets ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Het uur op de display begint te knipperen, laat de mode knop los.

Stel met de **HR** toets het juiste uur in.

Stel met de **MIN** toets de juiste minuten in.

(ingedrukt houden om sneller te gaan)


Druk 1x op de **MODE** toets om te bevestigen.

2. Alarmen instellen

Druk 1x op de **MODE** toets

Het nummer van het alarm verschijnt rechts boven de seconden. 


Nu kunt u alarm 1 instellen, op dezelfde manier als u de tijd insteld (zie: de juiste tijd instellen).

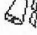Als het alarm ingeschakeld is, verschijnt  links boven.

Om het alarm uit te schakelen, drukt u 1x op de **AL** toets.

Om het alarm terug in te schakelen, drukt u weer 1x op de **AL** toets.


Voorbeeld; Alarm 1 is ingeschakeld om 07:00.

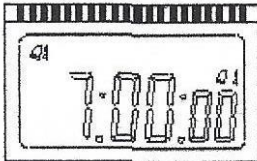

Om alarm 2 t/m 7 in te schakelen, drukt u weer 1x op de **MODE** toets.

Het nummer van het alarm verschijnt rechts boven de seconden. 

Nu kunt u alarm 2 instellen, op dezelfde manier als u de tijd instelt (zie: de juiste tijd instellen). Dit geldt ook voor de overige alarmen, tot en met het 7^e alarm

Als het alarm ingeschakeld is, verschijnt  links boven.


Om het alarm uit te schakelen, drukt u 1x op de **AL** toets.

Om het alarm terug in te schakelen, drukt u weer 1x op de **AL** toets.

3. Alarm wijzigen / bekijken

Om van de tijd naar een bepaald alarm te gaan: druk op de **MODE** toets.

Om vervolgens naar het volgende alarm, of terug naar het uur te gaan: druk op de **MODE** toets.

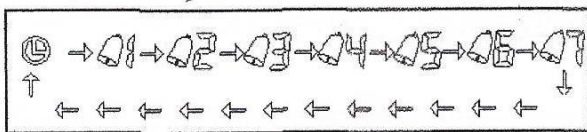

4. Type alarm instellen

Aan de **zijkant** van de timer vind je de schuifknop om het type alarm in te stellen.

A: enkel geluid

V: enkel trilsignaal

A/V: geluid en trilsignaal samen